

## Kontakt

### Kunstaugen-Institut Leipold GmbH

Steeler Straße 180  
45138 Essen  
www.kunstauge.info

Tel.: 0201 - 27 21 21

#### Sprechzeiten:

Mo., Di. + Do.: 8.00 - 12.30 Uhr + 14.00 - 15.00 Uhr


Mi. + Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr

WICHTIG: Eine Behandlung ohne telefonische Terminvereinbarung ist leider nicht möglich!

Die Termine für unsere Sprechtage in Arnshagen, Bielefeld, Dortmund, Paderborn, Soest und Wesel finden Sie im Reiseplan auf unserer Website.



## Ihr Weg zu uns

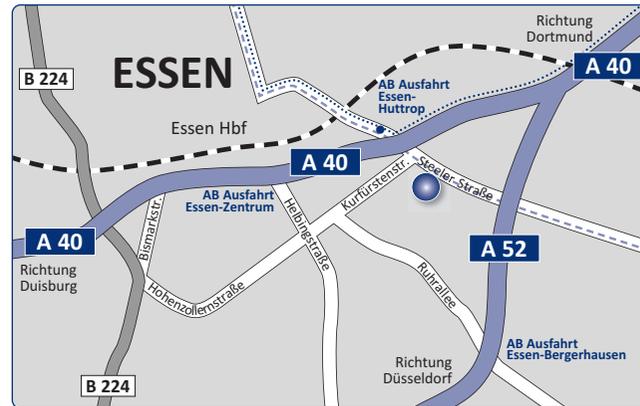


• Steeler Straße 180  
45138 Essen  
Tel.: 0201 - 27 21 21  
Fax: 0201 - 28 86 98  
www.kunstauge.info

• ÖPNV:  
Haltestelle  
Essen-Wasserturm

.....  
Buslinien 146 und 147

---  
Straßenbahnen 103 und 109

KUNSTAUGEN-INSTITUT  
 **Leipold**  
GmbH

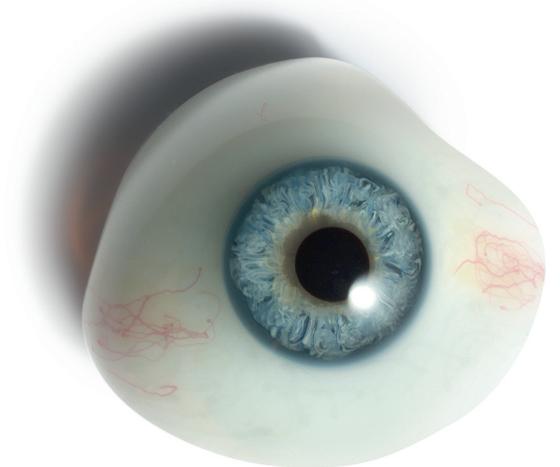

Informationen  
für Patienten  
und Ärzte

KUNSTAUGEN-INSTITUT  
 **Leipold**  
GmbH

Seit 1920 auf Augenhöhe  
mit unseren Patienten



## Über das Kunstaugen-Institut Leipold

Seit fast einhundert Jahren werden im Essener Kunstaugen-Institut Leipold individuell gefertigte Augenprothesen aus Glas hergestellt und angepasst. Unser im Jahr 1920 gegründetes Institut befindet sich bis heute in Familienhand und wird aktuell in der vierten Generation geführt.

Im gesamten Ruhrgebiet sind wir dank unserer langjährigen Erfahrung die erste Anlaufstelle für qualitativ hochwertige und passgenaue Kunstaugen aus Glas. Doch auch über den „Pott“ hinaus haben sich unsere erfahrenen Ocularisten längst einen Namen gemacht. Vom Niederrhein bis ins Sauerland finden regelmäßig Sprechtage statt, auf denen Patienten auch vor Ort behandelt werden können.



Das Team des Kunstaugen-Instituts Leipold



Ästhetisch und optimal verträglich –  
dank individueller Anpassung

### Kunstaugen aus Glas

Jede Augenprothese ist eine individuelle Einzelanfertigung aus hochwertigen Spezialgläsern. Sie wird in Form und Farbe genau auf die Bedürfnisse des Patienten angepasst und von unseren erfahrenen Ocularisten in Handarbeit gefertigt. Dank der individuellen Anpassung kann die Prothese nicht nur bequem getragen werden, sondern gewährleistet auch ein hohes Maß an Ästhetik und Unauffälligkeit.

Die Prothese besteht zu 100 Prozent aus Glas. Das bedeutet auch alle farbigen Teile werden nicht etwa aufgemalt, sondern aus speziellen Farbgläsern eingearbeitet. So benötigen wir keine Lacke oder andere chemische Zusatzstoffe. Allergische Reaktionen oder materialbedingte Unverträglichkeiten sind daher nicht bekannt.

Die äußerst glatte Oberfläche des Glases schont die empfindliche Bindehaut besser als jedes andere Material. Zudem kann sich so ein einheitlicher Tränenfilm auf dem Kunstauge bilden, der vor Trockenheit schützt.

## Der Besuch beim Ocularisten

### Wissenswertes zur Behandlung

Die Anpassung eines Kunstauges verursacht keine Schmerzen und dauert nur ein bis zwei Stunden. Die Kosten werden von der Krankenkasse oder der zuständigen Berufsgenossenschaft übernommen.

#### Die Erstanfertigung

Etwa 10 - 14 Tage nach der Operation sollte das erste Kunstauge angepasst werden, um ein Schrumpfen der leeren Augenhöhle zu vermeiden. Dazu wird der behandelnde Ocularist zunächst vorsichtig ein Modellauge einsetzen, um eine passgenaue Arbeitsvorlage zu erhalten. Anhand dieses Modells wird eine in Form und Farbe individuelle Augenprothese angefertigt. Diese kann anschließend eingesetzt und sofort mitgenommen werden.



#### Die weitere Behandlung

Da die Augenhöhle in den ersten 2 - 3 Monaten nach der Operation noch weiter abschwilt, muss in der Regel nach dieser Zeit ein neues, passgenaues Kunstauge angefertigt werden. Zum Schutz der Augenhöhle sollte die Prothese anschließend jährlich ausgetauscht werden.

#### Für eine Behandlung wird folgendes benötigt:

- ein telefonisch vereinbarter Termin
- ein gültiges Kassenrezept (wird vom Augenarzt ausgestellt)
- 10 Euro Zuzahlung (entfallen bei Minderjährigen oder bei Vorlage eines gültigen Befreiungsausweises)