

Yapay Cam Göz Kullanımı Hakkında Bilgiler

I Sayın Hastamız,

Yapay cam göz, gerçeğe uygun yapısı sayesinde size, büyük oranda dikkat çekmeme, estetik ve kişisel olarak güvenli bir şekilde davranma olanağı sağlar.

Ama lütfen şunu hiçbir zaman unutmayın: Göz protezinizi rahatça kullanabilmeniz için ön koşul doğru bakım ve kullanımdır. Bunu sağlamak aşağıdaki bilgilere tam olarak uymanız durumunda oldukça kolaydır. Bu nedenle lütfen bu bilgileri özenle okuyun. Sorularınız olursa uzman okülaristlerimize başvurun. Size mem-nuniyetle yardımcı oluruz.

I Yapay Gözünüzün Özellikleri

Göz proteziniz, göz çukuruza göre özel olarak üretilmiş ve ayarlanmıştır. Malzeme olarak yapay göz yapımı için özel olarak üretilen yüksek kaliteli özel camlar kullanılmıştır. Yüzeyin, agresif göz yaşı sıvısına karşı çok yüksek derecede dirençli olması, optimal bir mukozaya uyumluluğunu garanti eder. Protezinizin iyi taşıma özelliklerine sahip olması size, iş, hobi ve sporda optimal bir hareket alanı sağlar. Böylece örneğin, protezinizle birlikte yüzmeye de¹ gidebilirsiniz. Ancak lütfen şuna dikkat edin: Kirlilik veya sudaki klor nedeniyle bir yüzücü gözlüğü kullanmanız önerilir. Ayrıca sonrasında protez ve göz çukurunun evde temizlenmesi gerekir.

¹ İstisnası: Dalma sporu! İcabında okülaristinizle görüşün.

I Temizlik ve Bakım

Protez günde bir kez iyice temizlenmelidir. Bunun için yalnızca duru, ılık su² kullanın. Aşırı sıcaklık dalgalanmalarının malzemenin kullanım ömrünü olumsuz etkilemesi nedeniyle, sıcak veya çok soğuk su kullanımından önemle kaçınılmalıdır. Aynı şekilde temizlik için lütfen aşındırıcı sıvı ve sert maddeler kullanmayın. İnatçı kirlerde yapay göz yaklaşık 10 dakika süresince sıvıya daldırılabilir. Bunun için alkollü, bakteri öldürücü sıvılar kullanılabilir. Sonrasında protezinizi duru su ile tekrar iyice temizlemeyi unutmayın. Yapay gözü kullanmadığınız zamanlarda kapalı bir kapta kuru şekilde saklayın.

Lütfen dikkat edin: Yapay göz esas olarak suyun içinde **saklanmamalıdır!**

Yapay gözün gündüz ve gece takılı durumda kalması konusuna okülaristinizle birlikte duruma göre karar verilmelidir.

² Şebeke suyu, içme suyu kalitesinde olmayan ülkelerde kesinlikle gazsız maden suyu kullanmalısınız. Tatil yapılacak Avrupa'daki bazı ülkelerde bu şekilde davranmak akılcı olabilir.



I Banyoda Temizlemeyin!

Yapay cam gözler çok sağlamdır ve kırılma tehlikesi düşüktür. Camdan yapılan her maddede olduğu gibi bunlar da esas olarak kırılındır. Bu nedenle protezler banyoda çıkartılmamalı ya da temizlenmemelidir. Yapay gözün lavabo veya fayansa düşmesi, hemen hemen her zaman bir hasara neden olur. Lavabonun içinde havlu veya su olması da bu durumu engelleyemez. En iyisi tabanında halı döşeli fayanssız bir odada, içinde ılık su olan bir plastik tasın kullanılması tavsiye edilir.

I Yapay Gözün Takılması

Esas olarak yapay gözü takmadan önce ellerinizi yıkamalısınız. Protezin nemlendirilmesi tavsiye edilir.


Lütfen dikkat edin: Çoğu protezde kısa taraf burnu gösterir (karşılaştırınız, sağ alttaki resim). Bu durum, birçok protezin tasarımının bu standarttan farklı olması nedeniyle kural oluşturmaz.

Protezin takılması, önce yukarı kaldırılan üst göz kapağının altına protezi iterek ve bu konumda tutarak yapılır. Yapay göz, alt göz kapağını hafifçe aşağı çekmek suretiyle alt göz kapağının arkasına nihai konumuna kayar. İçerde kalması olası havanın boşaltılması için gerekirse gözün üstüne parmakla hafifçe bastırarak protezinizin yerine oturması düzeltilebilir. Protezinizin takılması sırasında olabilecek olası istisnalar hakkında okülaristiniz gerekirse sizi bilgilendirecektir.

I Yapay Gözün Çıkartılması

Protezi çıkartmadan önce de lütfen ellerinizi yıkayın ve yapay gözün düşmesi durumunda hasar görmemesi için altına yumuşak bir altlık koyun. Protez en kolay şekilde bir kontakt lens çıkartma aparatı kullanılarak çıkartılabilir. Bunun için aparatı protezin ortasına oturtun ve diğer elinizle alt göz kapağını hafifçe aşağıya çekin. Artık yapay gözü aparatla öne doğru çekip çıkartabilirsiniz. Alternatif olarak, protezi parmaklarınızla da çıkartabilirsiniz. Bunun için protezin alt kenarı açıkta kalacak şekilde alt göz kapağını aşağıya doğru bastırın. Sonra, işaret parmağınızın ucunu protezin alt kenarının altına kaydırın ve göz çukurundan aşağıya doğru çıkartmak için orta parmağınızla yapay gözü tutun.

Lütfen dikkat edin: Gözde ovalama veya silme hareketi yaparsanız, daima burun yönüne doğru yapın. Ters yönde yapılacak bir ovalama hareketi, protezi ters döndürebilir ya da dışarı bastırıp çıkartabilir.

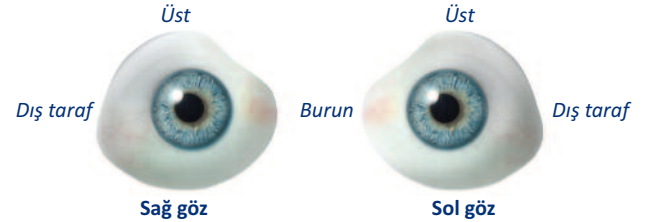

Tipik protez şekli

I Yapay Gözün Kullanım Ömrü

Her göz protezi agresif gözyaşı sıvısı nedeniyle doğal bir aşınmaya maruz kalır. Aşınma ayrıca örn. çevre etkileri, göz çukurunun yapısı, gözyaşı akış şiddeti vb. gibi çeşitli faktörlere de bağlıdır.

Bu nedenle yapay gözünüzün yılda bir kez değiştirilmesi gerekir. Örneğin toz gibi çevrenin olumsuz etkileri veya kimyasal maddelerle temas, kullanım ömrünü önemli ölçüde azaltabilir.

Ameliyat sonrası ilk göz protezi özel bir durum arz eder. İyileşme süreci nedeniyle göz çukuru değişmeye devam ettiği için bu protez sadece yaklaşık **3 ay** kullanılır.

Yıpranmış bir yapay göz, göz çukurunda rahatsızlıklara neden olur. Pürüzlü hale gelen protez yüzeyi, göz çukurunu şiddetli bir şekilde tahriş edebilir. Protezinizin değiştirilmesi gerektiğini gösteren ilk belirti gözyaşı akışının artmasıdır. Göz çukuru kızarıp ve sonraki aşamada koyu, sarımsı bir sıvı meydana gelebilir.

Göz çukurunun göz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve göz protezinizin uzman okülarist tarafından yılda bir kez yenilenmesi, yapay gözünüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Yapay göz, küçük çocuklarda büyümeye bağlı olarak büyük ölçüde daha kısa aralıklarda yenilenmelidir. Bu konu hakkında okülaristinize danışın.

I Son Olarak Bazı Bilgiler:

- Göz protezinizin hazırlanabilmesi için her zaman önceden bir randevu alın.
- Hasar gören bir protezin onarılması mümkün değildir. Bu durumda okülaristiniz yeni bir yapay göz hazırlamak zorundadır.
- Yapay gözün kırılması durumunda, lütfen mümkün olduğunca kırılan tüm parçaları yeni yapay gözün hazırlanmasında örnek olarak kullanılabilmesi için toplayın.
- Protezinizin optimal bir şekilde ayarlanabilmesi için bizzat hazır bulunmanız gerekir. Bu mümkün olmazsa lütfen bizimle iletişime geçin.
- Yapay gözünüz, göz çukuruza göre özel olarak ayarlanmıştır. Randevu sonrasında yine de protezinizle ilgili sorun yaşarsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede bizimle iletişime geçin.



Kunstaugen-Institut Leipold GmbH

Steeler Straße 180

45138 Essen - ALMANYA

Tel.: +49 (0) 201 - 27 21 21

Fax: +49 (0) 201 - 28 86 98

www.kunstauge.info